




Pautas para la impresión y registro de la mordida

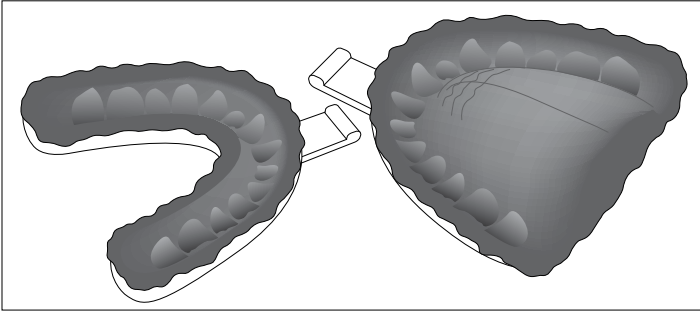


Tome impresiones superiores e inferiores de arco completo con materiales de impresión de alginate o polisiloxano de vinilo (VPS).

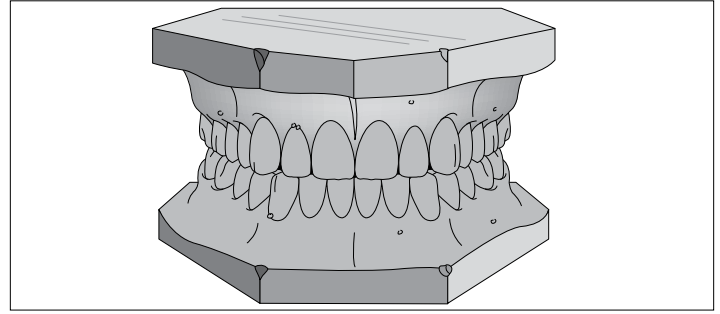


Vierta las impresiones de alginate húmedo con piedra dental de acuerdo con la proporción adecuada de agua/polvo indicada por el fabricante antes de enviarlas al laboratorio con la prescripción.

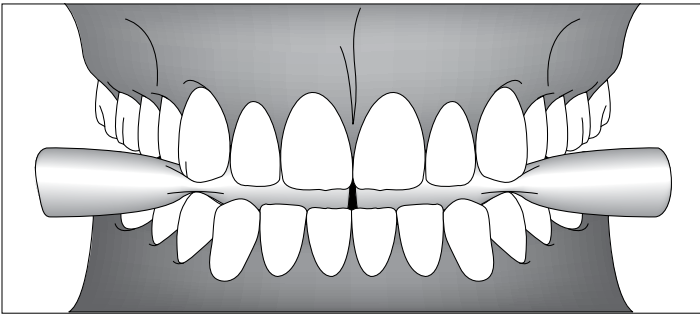


Una técnica de mordida rápida consiste en colocar dos rollos de algodón detrás de los caninos y guiar al paciente hacia una relación céntrica.

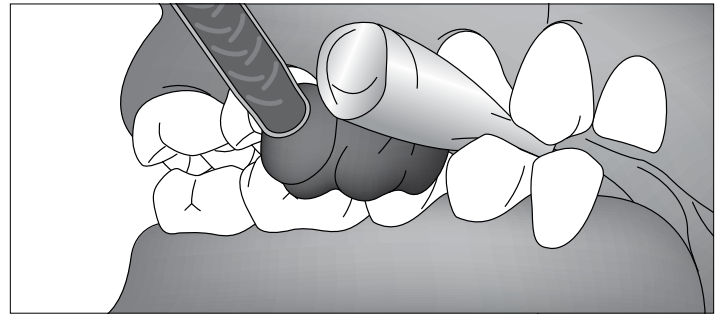

Con el paciente en esta relación céntrica abierta, inserte un registro de mordida en las aberturas posteriores de ambos cuadrantes.

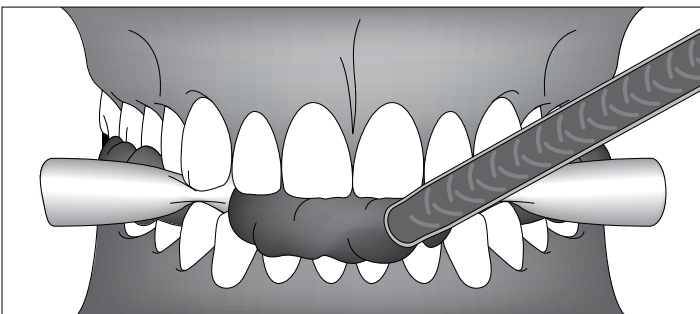

A continuación, inserte el registro de mordida en la abertura anterior para capturar una mordida constructiva abierta completa en relación céntrica.

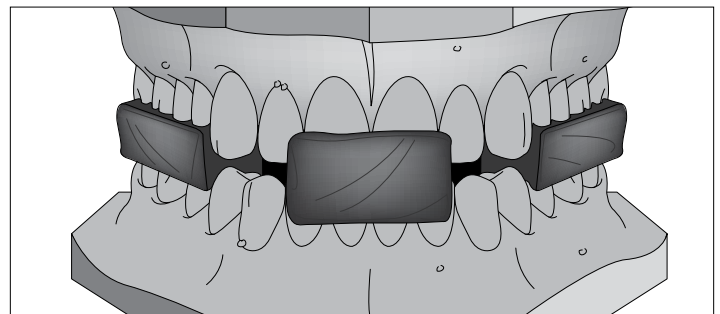

Modelos de piedra superiores e inferiores montados con mordida constructiva abierta. Observe las aberturas entre los dientes anteriores.

Para obtener más información, visite mx.glidewelldental.com

Ciudad de México:
01-800-212-9080
mail@glidewelldental.mx

Tijuana:
01-800-800-7075
mail.tj@glidewelldental.mx

 **GLIDEWELL
LABORATORIOS**